


Instrucciones de uso: Apex Gel

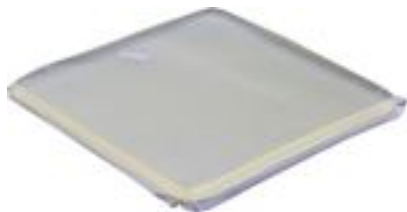

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar la almohadilla, y consérvelas por si las necesitara en un futuro.

1. Consignas de seguridad

- ♥ Consulte SIEMPRE con su médico o proveedor para determinar el ajuste y el uso adecuados para el dispositivo.
- ♥ No almacene las almohadillas de gel en el exterior, ni las deje al sol (Atención: no las deje en el interior de un coche con altas temperaturas exteriores).
- ♥ Almacénela en una estancia seca, en posición plana, para que no se deforme, se estire o se rasgue la película superficial exterior.
- ♥ Guarde los cojines de gel alejados de objetos afilados o bordes puntiagudos para evitar rasgaduras y pinchazos.
- ♥ Si se guarda a temperaturas inferiores a los 15°C, desempaquete el cojín y expóngalo durante 30 minutos a una temperatura ambiente > 15°C.
- ♥ Transporte el cojín en plano (enrollado en cojines de mayor tamaño) para evitar rasgaduras y pinchazos. , Busque grietas en la base de plástico antes de usar el cojín.
- ♥ Antes de usar el cojín de gel, asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper el cojín en cuestión.
- ♥ No utilice en condiciones extremas de temperatura (por encima de los 38°C o los 100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F).
- ♥ No se deberán realizar modificaciones en el dispositivo.
- ♥ Determine qué asiento es el adecuado para su cojín.
- ♥ Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su sitio antes de utilizarlo.
- ♥ Si no hubiera utiliza el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico que lo revise antes de utilizarlo.
- ♥ Respete SIEMPRE el límite de peso que figura en la etiqueta del dispositivo.
- ♥ Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodele ni se ponga de pie encima de él.
- ♥ Si notara que aparecen rojeces en su piel, deje inmediatamente de utilizar el cojín y consúltelo con su médico o terapeuta.
- ♥ Tenga cuidado cuando coloque el cojín sobre una silla de ruedas. La silla de ruedas ha sido diseñada para ofrecer la estabilidad necesaria durante las actividades diarias normales. Colocar un cojín tendrá un impacto en la posición del centro de gravedad, que podría hacer que la silla de ruedas basculara y cayera.
- ♥ Siga los consejos del profesional que le prescribió este dispositivo médico, respete la duración y la frecuencia de uso.
- ♥ Si no consiguiera una sensación de comodidad, consulte con un profesional.

4. Instrucciones para lavarlo

Para lavar la tapa:

Quite la tapa del cojín. Las tapas se pueden lavar en la lavadora a 30°C. Séquelas siempre en plano, y alejadas de cualquier fuente de calor. No utilice detergente ni lejía, no introducir en autoclave.

Para lavar el cojín:

Quite la tapa, enjuáguela ligeramente con un paño húmedo. No utilice jabón, ni la sumerja en agua. Tras su limpieza asegúrese de que lo seca bien además de secar con aire el cojín antes de utilizarlo. Vuelva a colocar la tapa en el cojín o en la almohadilla, asegurándose de que la parte posterior de la tapa se adapte correctamente a la base de espuma o de gel. La etiqueta que tiene la tapa va a marcar la parte posterior de la misma. Busque roturas, arañazos y pinchazos en el cojín antes de volver a instalar la tapa. Si tuviera cualquier problema, póngase en contacto con su personal técnico.

5. Composición

Gel de poliuretano Los cojines se suministran con una cubierta de 3D o de poliuretano. Los dos tipos de cubierta tienen una base antideslizante y son herméticas por la parte superior.

6. Eliminación

Este producto deberá eliminarse de conformidad con el reglamento de eliminación de residuos.

7. Ficha técnica

Este producto tiene una garantía de 2 años, a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier tipo de defecto.

Este producto es biocompatible.

Este producto ha sido homologado por la CE



Herdegen SAS
7 rue Eugène Freyssinet
77500 Chelles

Distribuido por :

Apex Medical S.L.

Elcano 9, 6ª planta Bilbao,
48008, Spain

T +34 94 4706408

F +34 94 4706409

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

