

MANUAL DE USO ANDADOR FUTURA



El Andador Futura está diseñado para ofrecer al usuario el máximo de independencia y seguridad. Su diseño pre ensamblado no requiere de herramientas y permite utilizarlo de manera inmediata teniendo en cuenta breves indicaciones.

Recomendado para personas de hasta 100 kgs.

ADVERTENCIA

No usar este producto para ningún otro fin que no sea como ayuda para caminar. No debe de usarse como si fuera una silla de ruedas o escalera.

EMBALAJE

Deseche el embalaje en su centro de reciclado local.

Deseche el envoltorio y la caja por separado.

Deseche el artículo al final de su vida útil en un punto limpio.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque el andador de la caja. Enganche las barras del manillar en el andador y ajústelo con la altura deseada mediante las palometas. Dispone de 5 alturas diferentes.
2. El andador se pliega tirando del asa del asiento hacia arriba. Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

USO DEL ROLLATOR

Por favor lea todas las instrucciones del andador antes de usarlo.

El Andador Futura está diseñado como un dispositivo de ayuda para caminar que permite al usuario distribuir su peso en el manillar para favorecer el movimiento en las distancias largas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Revise con regularidad que las palometas y tonillos están en buen estado.
- Mantenga las ruedas limpias.
- Reemplace las ruedas si sufren algún daño.
- Para limpiar el andador use agua jabonosa y un paño suave. Utilizar paños o productos abrasivos puede provocar rallones.