

MANUAL DE USUARIO

Elevador Inodoro Enea



Le rogamos que lea estas instrucciones de seguridad detenidamente antes de usar el aparato. Por favor, consérvelas para consultarlas en el futuro.

1. Indicaciones de seguridad

- CONSULTE siempre con su médico o proveedor para determinar el ajuste apropiado y la forma correcta de usar el aparato.
- No se incline hacia la parte exterior del asiento elevado para evitar caerse del aparato.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la tapa.
- No lo guarde en el exterior y no lo deje al sol (*Cuidado: ¡¡no deje el producto en el interior de un coche si hay temperaturas elevadas en el exterior!!*)
- No lo use en el exterior; exclusivamente para uso en el interior y en inodoros estándar.
- Utilícelo únicamente como asiento elevado del inodoro y de una forma adecuada: no se ponga de pie sobre el producto, ni se siente sobre la tapa.
- Respete EN TODOS LOS CASOS el límite de peso que aparece en la etiqueta de su aparato.
- No se deben realizar modificaciones de este aparato. Para reemplazar las piezas rotas o defectuosas y asegúrese de que el cambio sea realizado por personal técnico cualificado.
- Después de montar el producto, asegúrese de que está firmemente sujeto y fijo antes de utilizarlo.
- Si no ha utilizado su asiento elevado durante mucho tiempo, asegúrese de que lo inspeccione un técnico especialista antes de utilizarlo.
- Compruebe siempre la estabilidad antes de utilizarlo.

2. Instalación

El producto únicamente puede ser ajustado por especialistas, que le asesorarán sobre la manera de utilizarlo. Un uso o ajuste inadecuado puede generar un exceso de tensión en el aparato o en el paciente. El aparato debe ser ajustado individualmente por el personal técnico para adecuarse a las necesidades del usuario.

Pregunte al personal técnico cómo se usa este producto y asegúrese de que entiende claramente su explicación. Si no está seguro, no dude en volver a preguntar. No utilice el producto si percibe cualquier tipo de riesgo.



Pasos a seguir para su colocación:

1. Levante el asiento del inodoro.
2. Empuje el alza del asiento hacia abajo en la taza del inodoro, hasta que encaje.
3. Asegúrese de que los "labios" del alza del asiento cubren el borde de la taza del inodoro.
4. Compruebe la estabilidad antes de usarlo.
5. Retire sencillamente el alza del asiento para limpiarla y repita la instalación desde el paso número 1.

Alquiler: este producto puede alquilarse con la condición de que se limpie correctamente. Este manual de usuario corresponde al producto, y debe ser entregado a cada nuevo usuario.

3. Limpieza

El alza del asiento del inodoro debe ser limpiada a diario con un limpiador no abrasivo. Puede limpiarse con productos que no contengan lejía, como Surfánios (Laboratorios Anios) o con agua jabonosa. No utilice detergentes corrosivos o abrasivos, ni limpiadores a presión. Se puede esterilizar a 90°C (194°F) y 80% de humedad durante 5 minutos.

4. Materiales

El asiento está hecho de una pieza, la cobertura es de plástico y el interior de espuma.

5. Eliminación

Elimine este producto siguiendo las normas de eliminación de residuos de su región.

6. Especificaciones técnicas

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, frente a cualquier defecto de fabricación. Este producto es biocompatible.



HERDEGEN SNC 2.

Rue Freyssinet. 77500 CHELLES-FRANCE



Distribuido por:



Care for a Healthy Life

APEX MEDICAL S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta

48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: (+34) 94.470.64.08

Fax: (+34) 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com