

MANUAL DE USO DEL ROLLATOR CLASSIC



El Rollator está diseñado para ofrecer al usuario el máximo de independencia y seguridad. Su diseño preensamblado no requiere de herramientas y permite utilizarlo de manera inmediata tomando en cuenta unas breves indicaciones.

Recomendado para personas de hasta 100 kgs.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN

1. Saque el Andador de la caja y despliéguela completamente, presionando hacia abajo las dos bisagras que se encuentran a sus costados.
2. Coloque la canastilla sobre el tubo central del Andador y baje el asiento hasta que quede en paralelo al suelo.
3. Inserte los tubos (macho) con los frenos izquierdo y derecho en los tubos receptores superiores (hembra) del chasis del andador y ajústelos a la altura que considere oportuno para Usted. Puede seleccionar uno de los niveles previstos para esta función.

NOTA: Asegúrese de apretar firmemente los ajustes una vez los frenos están a la altura deseada.

El andador cuenta con un freno en cada rueda trasera que puede ser utilizado de manera independiente o simultánea. Los frenos de seguridad de su andador pueden dejarse accionados para evitar que se ruede sola en superficies con algún grado de inclinación.

El arco del rollator se puede poner y quitar fácilmente presionando en el botón negro que tiene a cada extremo.



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie su Rollator con un pañuelo húmedo y después séquela con un paño limpio.

En caso de no utilizar su Rollator por un tiempo prolongado puede simplemente plegarla y almacenarla, no requiere mucho espacio.